

**ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:**

№ пом.	Наименование помещений рентгеновского кабинета	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Процедурная	36,1
2	Комната управления	15,0
3	Уборная	3,0

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :**

- ① ПОДПОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СО СЪЁМНЫМИ КРЫШКАМИ 150x100 (Н)
- ② ПОДПОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СО СЪЁМНЫМИ КРЫШКАМИ 100x100 (Н)
- ③ НАСТЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 150x60 (Н) НИЗ НА Н=300 ММ ОТ УР.Ч.П.
- ④ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ 150x100 (Н) ОТ УР.Ч.П. ДО ЩИТКА
- ⑤ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ 150x60 (Н) ОТ УР.Ч.П. ДО Н=3000 ММ
- ⑥ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ 150x100 (Н) ОТ УР.Ч.П. ДО Н=3000 ММ
- ⑦ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ 150x100 (Н), НИЗ НА Н=-120 ММ
- ⑧ БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 175 ММ
- ⑨ ОТВЕРСТИЯ (ЛЮЧКИ) ДЛЯ ВЫХОДА КАБЕЛЯ


**ПРИМЕЧАНИЯ :**

1. Монолитное бетонное основание выполнить из бетона класса С20/25 - С50/60 толщиной не менее 175 мм в ур.ч.п. Бетонное основание не должно содержать элементов армирования в местах крепления аппарата и должно иметь хорошее сцепление с плитой перекрытия.
2. Поверхность основания должна быть строго горизонтальной, допустимое отклонение от горизонтали не более 10 мм в пределах бетонного основания.
3. Поверхность пола и подпольных кабельных каналов должна быть обеспылена.
4. В зоне установки стола и гентри финишное покрытие пола линолеумом выполнить после монтажа аппарата.
5. Привязки кабельных каналов, коробов уточняются при монтаже. Изменения согласовываются в авторском надзоре.
6. Места выхода кабеля определяются при монтаже.
7. На дно кабельных каналов в процедурной уложить свинец, толщина свинца указана в расчете на пол.
8. Свинцовые листы окрасить масляной краской за два раза.
9. Под бетонное основание свинец не укладывается.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


						0876/06-19-ТХ			
						ООО "СМ-Медика"			
						117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 65, корп. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Рентгенодиагностический кабинет с аппаратом "Multitom Rax"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Вашанова					РП	25	28
Проверил		Вашанова							
Разраб.		Ильина							
						Места подвода инженерных сетей к технологическому оборудованию			
Н. контр.		Ильина							

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СХЕМА К РАСЧЕТУ ЗАЩИТЫ

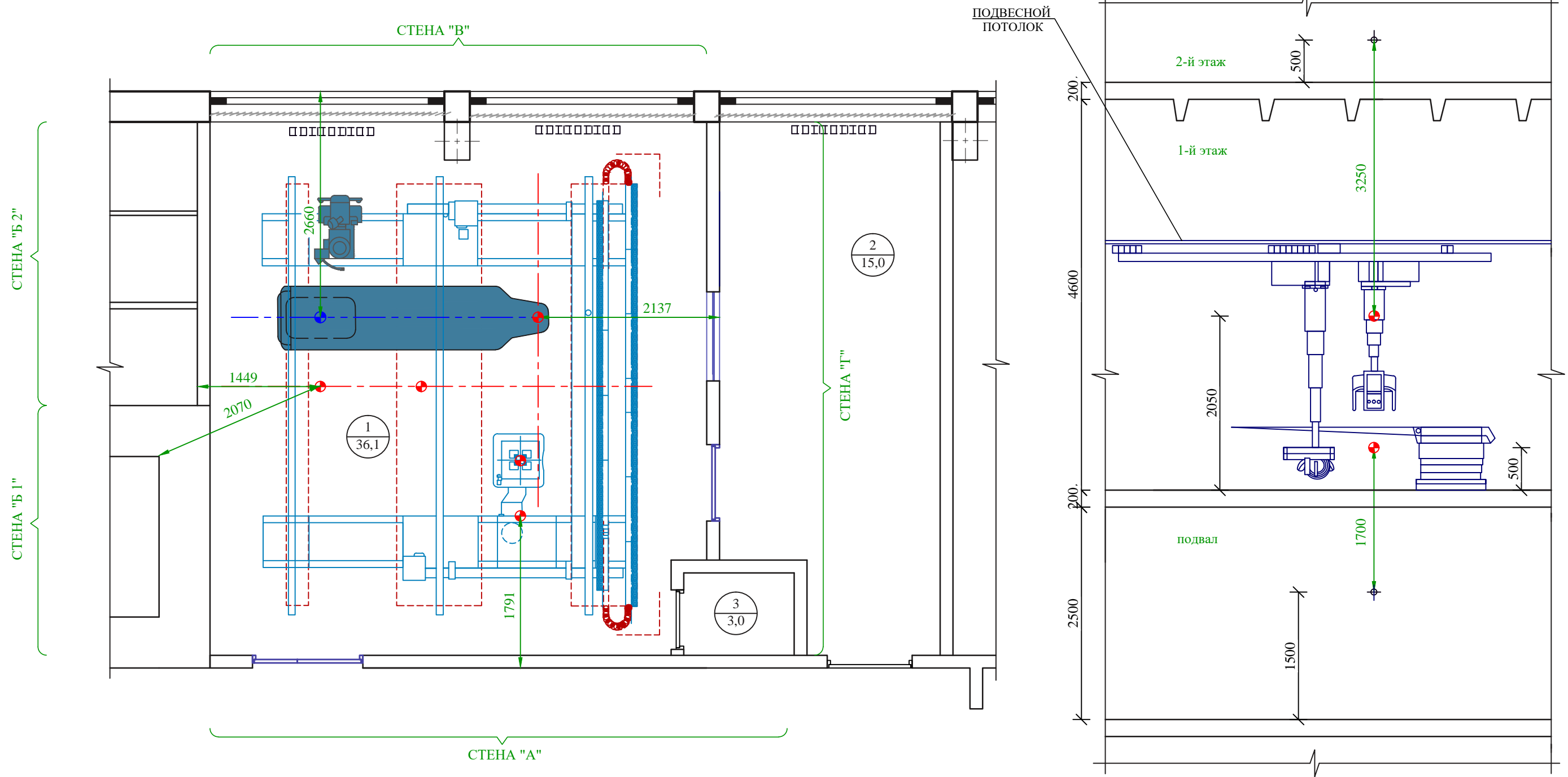

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:

№ пом.	Наименование помещений рентгеновского кабинета	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Процедурная	36,1
2	Комната управления	15,0
3	Уборная	3,0

						0876/06-19-ТХ			
						ООО "СМ-Медика"			
						117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 65, корп. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Рентгенодиагностический кабинет с аппаратом "Multitom Rax"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Вашанова					РП	26	28
Проверил		Вашанова							
Разраб.		Ильина							
Н. контр.		Ильина				Схема к расчету защиты			

Инд. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N